

## Clini-Jet

### ZUBEHÖR ZUR RESPIRATORÜBERLAGERUNG

#### Adapterschlauchset Standard

Zur intermittierenden und kontinuierlichen Überlagerung bei beatmeten Patienten.



Bestell-Nr. 8502Set

#### Adapterschlauchset Standard Luer

Für Dauerbetrieb mit Luer-Befeuchteranschluss (über Motorspritze)



Bestell-Nr. 8502LSet

Standard-Schlauchlänge 1,20 m.

Schlauchsets sind **unzerlegt autoklavierbar/Gummiprogramm.**

Anleitung zur Aufbereitung:

- Reinigung im Ultraschallbad für 5 min.
- Mit Wasser durchspülen.
- Thermische Desinfektion nach Richtlinie A 0 (90°, 5 min) im Injektorwagen einer Desinfektionswaschmaschine.
- Autoklavieren bei max. 134°

Da die Sets nicht steril geliefert werden, ist diese Vorgangsweise auch vor dem Erstgebrauch notwendig.

## Clini-Jet



### PATIENTENSET

Das Patientenset wird Therapie beim **spontan atmenden** Patienten verwendet. Es besteht aus Bajonettanschluss (=Verbindung zum Jet) mit Schlauch und Befeuchungskörper, mit abnehmbarem Becher (für 5 ml NaCl oder o.ä. pro 5 Min. Therapie). Passt ohne Mundstück auf Maske, Tubus und Tracheostomiekannüle (Mundstück abnehmbar). Medikamentenzusatz ist möglich, wenn die Lösung nicht zu dickflüssig wird.

**Bestell-Nr. 8501 (1 Pkg. = 10 Stück)**

Das Patientenset besteht aus PP (harte Teile) und thermoplastischem Kautschuk (weiches Mundstück).

### HYGIENE UND PFLEGE DES PATIENTENSETS

#### Grundvoraussetzungen

Für normale Patienten müssen Dinge, die in den Mund genommen werden, keineswegs steril, sondern nur hygienisch einwandfrei, also keimarm, sein. Dies gilt auch für das Clini-Jet Patientenset. Die Patientensets werden entsprechend der GMP-Regeln der WHO hergestellt und keimarm ausgeliefert

#### Für die hygienische Situation während der Anwendung sind folgende Punkte wesentlich:

1. Das Patientenset wird **einem** Patienten zugeordnet. Jeder zu behandelnde Patient hat also **sein** Patientenset, das er über die gesamte Behandlungsdauer verwenden kann.
2. Der Wasservorrat im Befeuchtungsbecher ist so klein gewählt (5ml), dass er bei einem Behandlungsschritt, schlimmstenfalls bei der Zweitbehandlung, leer läuft. Es kann daher in den Behandlungspausen keine Keimvermehrung eintreten (Cave: Pseudomonas-Problematik, grossvolumiger Befeuchtungsbehälter!).
3. Das Patientenset ist als Einmalteil zu der Behandlungsdauer **eines** Patienten konzipiert. Es kann aber nach Abschluss der Behandlungsserie sehr einfach allen gängigen Niedertemperatur Desinfektions-/Sterilisationsverfahren unterworfen werden. (Einlegen in Desinfektionsmittellösung, Behandlung in Desinfektionswaschmaschinen wie z.B. Narkoseschläuche, Gassterilisation mit Äthylenoxyd. Eine Wiederverwendung für andere Patienten ist materialtechnisch möglich. Die Patientensets sind aber nicht für ein besonderes Desinfektionsmittel validiert. All in der DGM-Liste aufgeführten Mittel sind geeignet. Die Herstellerangaben bezgl. Konzentration, Einwirkungszeit und Spülung sind einzuhalten.
4. Sofern erforderlich, kann das weiche Mundstück abgenommen und mit Wasser und Bürste gereinigt werden. Die Aufbewahrung des Sets in Patientennähe wird dadurch erleichtert, dass der Geräteanschluss in die harte Befeuchtungskammer passt. Das weiche Mundstück kann aufgefädelt oder am/im Nachttisch aufbewahrt werden.

#### Entsorgung: **Alle Teile sind frei von PVC und Latex**

Das Clini-Jet Patientenset wurde unter Beratung des Hygiene-Institutes der Universität Wien entwickelt.